



Digitální klinický teploměr TEMP 10

Rychloběžka s pozlaceným pružným analergickým hrotem

Aby jste mohli využít všech předností tohoto teploměru, důkladně prostudujte návod k použití.

Bezpečnostní pokyny: Teploměr používejte pouze k měření tělesné teploty. Nenechte jej upadnout na zem. Chraňte jej před vysokými teplotami (více než 60°C) a slunečním zářením. Nevývážejte! Hrot neohýbejte více než 45°. K čištění používejte výhradně vodu nebo běžné dezinfekční prostředky. Chraňte před dětmi - mohly by spolknout malé předměty (baterii).

Uvedení do provozu: Přístroj uvedeme do provozu stiskem tlačítka. Krátký zvukový signál udá, že přístroj je zapnut. Současně je prováděn tzv. LCD-test. Na displeji se zobrazí L a symbol „°C“ bliká - probíhá měření. V průběhu měření je zobrazována aktuální teplota. Během této doby stále bliká „°C“. Zazní-li 8x signální tón a „°C“ již neblinká, znamená to, že měření je nyní ukončeno. Na displeji je zobrazena nejvyšší naměřená hodnota, a to až do vypnutí teploměru. Teploměr vypnete krátkým stiskem obslužného tlačítka, teploměr se vypne. Jinak se teploměr po 10 min. vypne sám.

Funkční test: Při zapnutí teploměru dojde k testu. Objeví-li se symbol „Err“, nastala porucha.

Vyvolání naměřených hodnot z paměti: U vypnutého přístroje držte spínač cca 3 sekundy. Pak dojde k zobrazení poslední maximální naměřené hodnoty. Tento údaj zmizí po 2 sekundách a teploměr je připraven k dalšímu měření teploty.

Metody měření:

V ústech (orální): vložte teploměr ke kořenu jazyka, špička teploměru musí být v pevném kontaktu s tkání. Zavřete ústa a dýchejte nosem. Doba měření je cca 20 sekund. Pro porovnání s teplotou v podpaží odečteme 0,3°C. Průměrná teplota by měla být 36,6°C.

V konečniku (rektální): jde o nejspolehlivější metodu měření teploty, vhodnou zejména pro děti. Zaveďte špičku teploměru cca 2 - 3 cm do análního otvoru po dobu cca 10 sekund. Pro porovnání s teplotou v podpaží odečteme 0,5°C. Průměrná teplota by měla být 37,0°C.

V podpaží (axilární): tato metoda není z lékařského hlediska přesná. Doba měření cca 35 sekund (závisí na okolní teplotě). Průměrná teplota by měla být 36,1°C.

Bazální teplota (vaginální): Chcete-li měřit bazální teplotu k zjištění plodných a neplodných dnů, doporučujeme Vám spíše model Microlife MT 16C2, který ukazuje výsledek na 2 desetinná místa.

Čištění a dezinfekce: Teploměr je vodotěsný, smí být při čištění ponořen do vody, či běžného dezinfekčního prostředku. Špičku teploměru omyjte vlažnou mýdlovou vodou nebo lihem.

Upozornění: Redidla nebo jiné metody čištění čistění mohou způsobit poškození teploměru.

Technické údaje: Typ: Maximální teploměr.

Rozsah měření: 32,0°C až 43,9°C (90,0°F – 109,9°F)

Teploty pod 32,0°C jsou na displeji indikovány symbolem „L“

Teploty nad 43,9°C jsou na displeji indikovány symbolem „H“

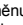
Přesnost měření: ± 0,1°C v rozmezí 34°C až 42°C při teplotě 18-28°C.

Automaticky testuje hodnotu 37,0°C, při odchylce vyšší než 0,1°C displej zobrazí symbol „Err“.

Ukazatel (displej): Třímístný ukazatel z tekutých krystalů (LCD) s nejmenší jednotkou 0,1°C.

Skladovací teplota: -25°C až +60°C.

Baterie: Typ: LR 41 1,55V. Provozní doba 140 hod. (cca 2000 měření).

Kontrola baterie: blikající symbol  signalizuje pokles napětí pod 1,435 V a upozorňuje na výměnu baterie. Teploměr a baterii likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru. Teploměr ani baterie nepatří do běžného domovního odpadu!! Papír a plasty odevzdejte na sběrné místo.

Záruční podmínky:

Záruka platí 36 měsíců ode dne zakoupení přístroje. Výrobek byl ve výrobním závodě pečlivě testován. V případě poruchy zašlete teploměr svému prodejci. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací či použitím výrobku. Záruční podmínky vznikají pouze na poruchy vzniklé v záruční době. **Na baterii se záruka nevztahuje.**

K reklamaci je třeba vždy přiložit potvrzení o nákupu - doklad, fakturu, účtenku(alespoň kopii)!

Výhradní distributor pro Českou republiku: BONECO CR, s. r. o., Viktorinova 80, 588 13 Polná, tel./fax :567 212 396

e-mail: info@boneco-cr.cz

www.boneco-cr.cz

Datum koupě:

Razítko prodejce:

